

SCHEMA PRODOTTO

Produttore: ZHEJIANG LUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.


Wei 1st Road Mechanical Park, Wanquan Light Industrial Base Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, China.

LUYAO LTD è inclusa nella FDA-EUA White List americana e nella White List cinese delle aziende produttrici.

Nome Prodotto: Filtering Half Mask LUYAO LY-N900-N909 (LUYAO LY-N900-N909 Maschera facciale filtrante).

<https://luyaoppe.com>

Il prodotto è autorizzato all'importazione anche negli USA dalla FDA (*Appendix A: Authorized Imported, Non-NIOSH Approved Respirators Manufactured in China - Updated: October 1, 2020*).

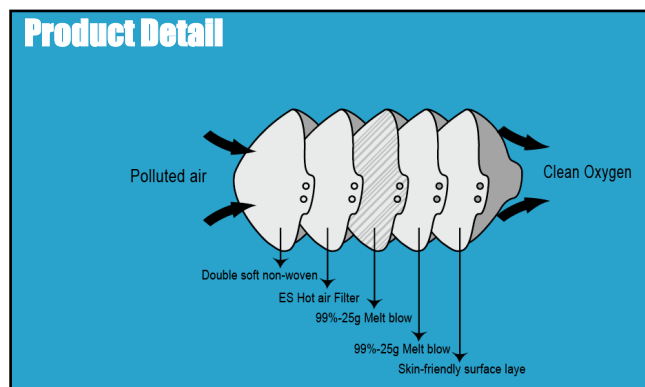

Product Detail



ACCORDING
EN149:2001+A1:2
009 FFP2 NR
STANDARD



Built-in nose
bridge



Strong welding
Up to 40N




Skin-friendly non-
woven fabric

MARCATURA CE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL PRODOTTO:

Il presente prodotto è munito all'origine di certificazione CE di conformità al Regolamento UE 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 ("Regolamento sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio") ed ha superato le prove tecniche, svolte secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009 dall'Organismo Notificato UNIVERSAL CERTIFICATION di Istanbul (NB-2163). Dispositivo Classificato FFP2 - NR (non riutilizzabile). Sono disponibili i seguenti attestati:


1. Certificato di conformità (Certificate of Conformance) n. 2163-PPE-730/01 del 09/06/2020 dell'Organismo Notificato UNIVERSAL CERTIFICATION di Istanbul (Organismo notificato nel sistema europeo NANDO al numero NB 2163 - Regulation EU 2016/425 Personal Protective Equipment), che attesta la conformità del prodotto agli standard, in accordo con la normativa EN 149:2001 + A1:2009 e PPE (EU) 2016/425, Annesso VII (Modulo C2), in conformità anche con l'approvazione del Tipo Europeo (v. numero 2). Validità del certificato sino al 08/06/2021. L'organismo Notificato ha confermato l'autenticità del certificato con apposita dichiarazione (v. numero 2).
2. Verifica validità certificato dal sito della UNIVERSAL CERTIFICATION di Istanbul.
3. Certificato di esame del Tipo Europeo (EU Type Examination Certificate) n. 2163-PPE-730 del 09/06/2020 dell'Organismo Notificato UNIVERSAL CERTIFICATION di Istanbul (Organismo notificato nel sistema europeo NANDO al numero NB 2163 - Regulation EU 2016/425 Personal Protective Equipment), che attesta l'esame del Tipo Europeo, in accordo con la normativa PPE (EU) 2016/425, Annesso 5. Viene specificato che il prodotto rispetta i parametri di Classe FFP2 - NR. Validità del certificato 5 anni. L'organismo Notificato ha confermato l'autenticità del certificato con apposita dichiarazione (v. numero 4).
4. Verifica validità certificato dal sito della UNIVERSAL CERTIFICATION di Istanbul.
5. Technical Assessment Report n° 2163-KKD-730 del 09/06/2020 della UNIVERSAL CERTIFICATION di Istanbul con l'esito delle prove tecniche eseguite sul prodotto. Il prodotto risulta conforme alla normativa EN 149:2001+A1:2009 per il grado di standard FFP2 NR. Tutti i test hanno dato esito positivo su tutti i campioni esaminati.

Il prodotto non necessita per tali motivi di alcuna deroga alla commercializzazione ex art. 15 D.L. n. 18/2020, né di alcuna comunicazione e/o autocertificazione inviata all'Istituto Superiore di Sanità o all'INAIL, essendone attestata e provata la conformità alle normative europee e nazionali.

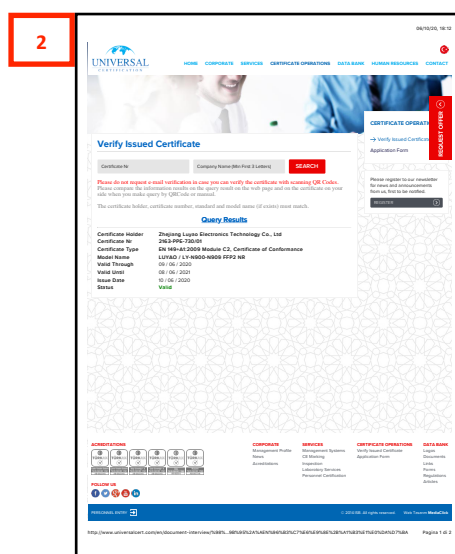

Scheda tecnica

1. Produttore:Produttore: ZHEJIANG LUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD, Wei 1st Road Mechanical Park, Wanquan Light Industrial Base Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, China.
2. Nome Prodotto: Filtering Half Mask LUYAO LY-N900-N909 (LUYAO LY-N900-N909 Maschera facciale filtrante).
3. Immagini prodotto:

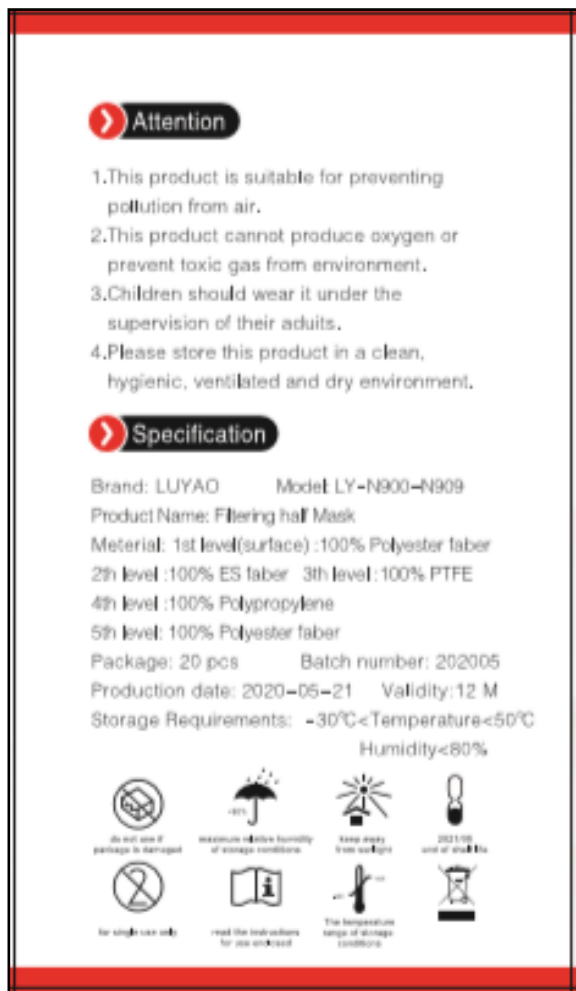


4. Composizione mascherina: 5 STRATI, TNT leggero (Tessuto Non Tessuto), ES Hot Air Filter, 2 Strati Melt Blown (99% - 25g/mq), strato interno TNT anallergico. Banda elastica orecchie. Clip naso lamina metallica.
5. Materiali:

1° strato	Tessuto Non Tessuto PE.
2° strato	ES (Ethylene-PropyleneSideBySide) Hot Air Filter (parte filtrante)
3° strato	Melt blown PTFE 99% 25 gr/mq (parte filtrante)
4° strato	Melt blown PP 99% 25 gr/mq (parte filtrante)
5° strato	Tessuto Non Tessuto PE anallergico (skin-friendly)

6. Peso : ca. 6 grammi/pezzo
7. Confezione : 20 mascherine in ogni box, confezionate singolarmente in busta sigillata semitrasparente.
8. Certificazione : CE (v. pagine 2 - 3)

9. Caratteristiche dispositivo : Filtering Half Mask LUYAO LY-N900-N909 (LUYAO LY-N900-N909 Maschera facciale filtrante), monouso, conforme alla normativa in vigore.
10. Sistema di tenuta al viso : Doppio elastico per le orecchie – lamina metallica per lo stringinaso
11. Modalità e consigli di utilizzo:
 Modalità di utilizzo:
 1. Aprire la mascherina con la lamina metallica per il naso verso l'alto.
 2. Indossare la mascherina appoggiandola sul naso.
 3. Agganciare gli elastici dietro le orecchie. Conformare lo stringinaso facendolo aderire ai contorni.
 4. Premere leggermente per ottenere la migliore aderenza anche sulle guance e sotto il mento.

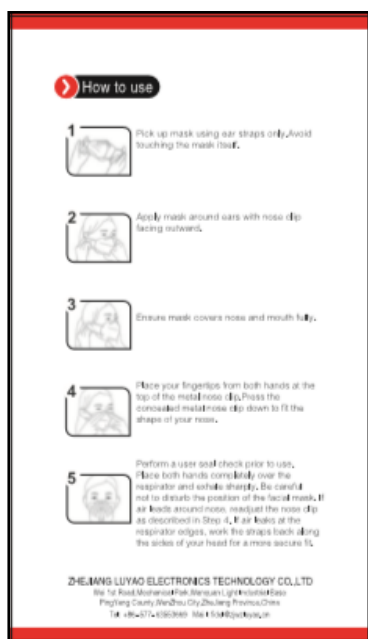

Consigli di utilizzo:

1. Indossate la mascherina secondo la descrizione delle immagini sotto riportate.
2. Se la mascherina risulta danneggiata, si consiglia di sostituirla immediatamente.
3. E' vietato indossare questo prodotto prima di andare a dormire e durante il sonno.
4. Dopo aver indossato la mascherina evitare di avvicinarsi a qualsiasi fonte di calore e/o fiamma, che potrebbero causare ustioni o deformazioni del materiale.
6. Il prodotto è monouso (NR), si prega di non riutilizzarlo per più volte.
7. Per lo smaltimento si prega di legarla con gli elastici delle orecchie prima di gettarla nella spazzatura (indifferenziato).

Durata della mascherina : la mascherina è progettata per uso continuativo fino ad un massimo di 8-12 ore, ma molto dipende dall'ambiente in cui si utilizza (più o meno polveri, pollini, aerosol etc).

12. Smaltimento : (v. sopra, consigli di utilizzo, n. 7).

MARCATURA CE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL PRODOTTO:

Il presente prodotto è munito all'origine di certificazione CE di conformità al Regolamento UE 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 ("Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio").

Il prodotto non necessita per tali motivi di alcuna deroga alla commercializzazione ex art. 15 D.L. n. 18/2020, né di alcuna comunicazione e/o autocertificazione inviata all'Istituto Superiore di Sanità o all'INAIL, essendone attestata e provata la conformità alle normative europee e nazionali.